



B 45 Desinfektionstücher

Gebrauchsfertig



Produktinformation

B 45 Desinfektionstücher sind aldehydfreie, gebrauchsfertige, parfüm- und farbstofffreie, alkoholhaltige Desinfektionstücher für die Schnelldesinfektion empfindlicher Oberflächen von nicht invasiven Medizinprodukten und anderen empfindlichen Flächen (wie z. B. Acrylglas, Mobiltelefone, Tablets, Monitore - Herstellerangaben beachten). B 45 Desinfektionstücher können in allen Bereichen, in denen ein hygienisch einwandfreier Zustand notwendig ist, eingesetzt werden.

- Praktische Desinfektionstücher mit vielfältigen Einsatzzwecken.
- Für empfindliche Oberflächen. Auch geeignet für Displays und Bedienfelder empfindlicher Geräte (Mobiltelefone, Tablets, Monitore etc.). Herstellerangaben jeweils beachten.
- Geprüfte Wirksamkeit mit breitem Wirkungsspektrum gegen Bakterien, Hefepilze und eine Vielzahl von Viren (begrenzt viruzid gegen behüllte Viren inkl. HBV, HCV und HIV sowie unbehüllte Noro-Viren).
- B 45 als Wirkstofflösung der B 45 Desinfektionstücher ist geprüft nach den aktuellen VAH-Methoden und europäischen Normen. Begrenzt viruzid gemäß DVV/RKI-Leitlinie.
- B 45 Desinfektionstücher sind VAH-zertifiziert.
- Parfüm- und farbstofffrei.
- Für die schnelle Zwischendurchdesinfektion.
- Praktische einfache Anwendung und Entnahme aus dem Flowpack.
- Mit wiederverschließbarem Clip.
- Tüchergröße: 175 x 250 mm.

MIKROBIOLOGISCHE WIRKSAMKEIT

Wirksamkeit		Einwirkzeit
Flächendesinfektion (VAH-Methoden) ¹⁾		1 Min.
Bakterien ¹⁾ inkl. MRSA ²⁾ , Hefepilze ¹⁾		1 Min.
Tb-Bakterien ¹⁾		2 Min.
Viren	Vaccinia-Viren, inkl. HBV, HCV und HIV ³⁾ , ⁴⁾	30 Sek.
	Noro-Viren ⁵⁾	5 Min.

¹⁾ Prüfung bei geringer und hoher Belastung (VAH, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 16615).

²⁾ Wirksamkeit gegen Bakterien schließt Wirksamkeit gegen MRSA ein.

³⁾ Prüfung ohne und mit Belastung gemäß DVV/RKI-Leitlinie.

⁴⁾ Gemäß RKI-Stellungnahme (Bundesgesundheitsbl. 60, 353 - 363, 2017).

⁵⁾ Prüfung bei geringer Belastung (EN 14476).

PRÜFUNGEN VON B 45

EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476 sowie im 4-Felder-Test gemäß VAH und EN 16615

LISTUNGEN VON B 45

VAH-Liste

IHO-Viruzidieliste

ANWENDUNG

B 45 Desinfektionstücher einzeln entnehmen, zu desinfizierende Flächen und Gegenstände abreiben und Präparat einwirken lassen. Die Einwirkzeit beträgt gemäß VAH 1 Minute. Nach Tuchentnahme Flowpack sofort wieder verschließen.

Produktinformation **B 45 Desinfektionstücher**

HINWEISE

Bei empfindlichen Oberflächen Beständigkeit an verdeckter Stelle prüfen. Es kann zu Abweichungen von Produktfarbe/Geruch kommen, insbesondere bei der Lagerung im Sonnenlicht. Diese Farb- bzw. Geruchsveränderung hat jedoch keinen Einfluss auf die Desinfektionsleistung des Produktes.

PRODUKTZUSAMMENSETZUNG

B 45 enthält als Wirkstoffe Alkohole und Quartäre Ammoniumverbindungen. 100 g Wirkstofflösung enthalten 17 g 1-Propanol, 0,125 g Alkyl-benzyl-dimethyl-ammoniumchlorid.

PACKUNGSGRÖßE

4 Flowpacks à 50 Tücher im Karton

ZUBEHÖR

Wandhalter für Desinfektionstücher im Flowpack

HALTBARKEIT

3 Jahre; Haltbarkeit nach Anbruch: 1 Monat

LAGERUNG

Präparat möglichst kühl, jedoch nicht unter 5 °C lagern

PHYSIKALISCHE DATEN

Wirkstofflösung:

Aussehen:	klare, farblose Flüssigkeit
Dichte:	D = 0,97 ± 0,02 g/cm ³ (20 °C)
Flammpunkt:	33 °C (nach DIN 51755)

ÖKOLOGIE

Die Wirkstofflösung B 45 ist biologisch leicht abbaubar gemäß OECD-Richtlinie 301 D. Die Verpackung ist stofflich und thermisch verwertbar. Gebrauchte Tücher über den Hausmüll entsorgen. Nicht über das WC entsorgen.

TOXIKOLOGIE

Die akute Toxizität von B 45 (LD₅₀ Ratte, oral, dermal) ist > 2000 mg/kg Körpergewicht. Damit ist B 45 als „nicht toxisch“ einzustufen. Bei Berührung mit den Schleimhäuten des Auges ist das Präparat als reizend anzusehen. Unter normalen Anwendungsbedingungen besteht kein Inhalationsrisiko.

GEFAHRENHINWEISE

B 45 Desinfektionstücher sind nach CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet: siehe Produktkennzeichnung und Sicherheitsdatenblatt.

UNABHÄNGIGES GUTACHTEN - Eigene Untersuchungen

Die Gutachten stehen Ihnen auf Anfrage zur Verfügung.

CE 0124

B 45 Desinfektionstücher vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Biozid-Reg-Nr. N-74956.

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf eingehenden internen und externen wissenschaftlichen Untersuchungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Unsere Haftung hierfür beurteilt sich nach unseren „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“, die bei uns jederzeit angefordert werden können.

Fragen Sie uns nach weiteren Präparaten des oro[®] Hygienesystems:

Instrumentendesinfektion ▪ Desinfektion von Flächen und Inventar
Desinfektion und Pflege von Händen und Haut ▪ Spezialanwendungen ▪ Zubehör